


# AIRS® (AICS®・AILS®) 検体処理方法

エーアイエルエス

アミノ酸を測る、今のからだを知る。  
aminoindex  
アミノインデックス

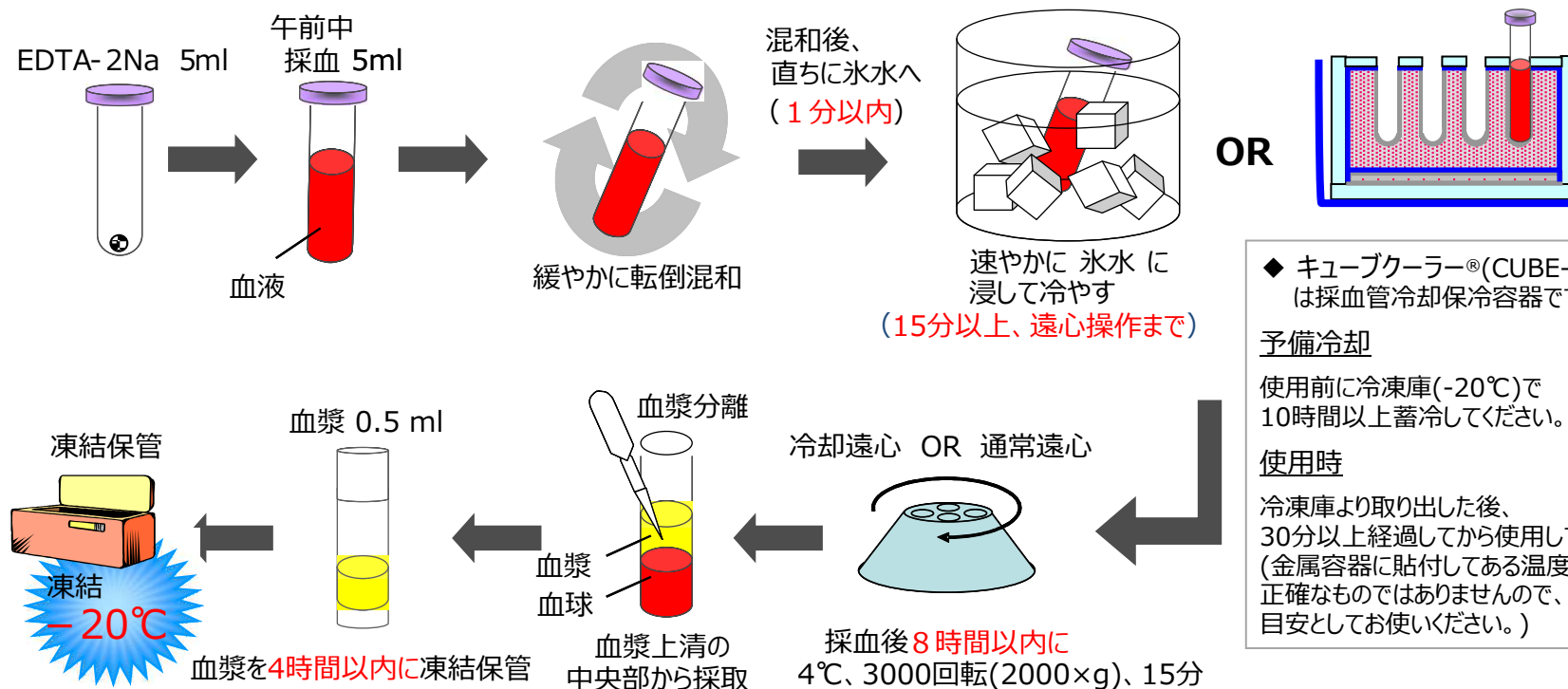

1. EDTA・2Na入り採血チューブにて血液約5mLを採取してください
2. 採血直後、血液を2～3回軽く転倒混和してください (ローラでの混和は行わないでください)
3. 混和後直ちに (1分以内) チューブを氷水中 (血液の液面まで氷水につかる状態) あるいはキューブクーラー®で冷却 (15分以上、遠心操作まで冷却) してください
4. 採血から8時間以内に冷却条件で遠心分離 (4℃、3,000回転 (2000×g) 、15分) または通常遠心分離 (3,000回転 (2000×g) 、15分、ローターが昇温していない) してください
5. 遠心後、直ちに上清の血漿を血液との界面に触れない様に血漿上清の中央部から採取し、分注してください
6. 分注後、血漿を4時間以内に凍結保管してください